



## BD MICROTROL DISKI



### TCS Biosciences Ltd

Botolph Claydon Buckingham MK18 2LR

Ir-Renju Unit

t: +44 (0)1296 714222

f: +44 (0)1296 714806

e: [sales@tcsgroup.co.uk](mailto:sales@tcsgroup.co.uk)

i: [www.tcsbiosciences.co.uk](http://www.tcsbiosciences.co.uk)



### TCS Biosciences Europe BV

Provincial Weg 6, Kornhorn,

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Imqassam minn:  
Becton, Dickinson and  
Company

BD u l-Logo BD huma trademarks ta' Becton, Dickinson and  
Company.

© 2022 BD. Id-drittijiet kollha riżervati.



HARĠA NRU 20  
FRA 2022

Storja tar-Revizjoni:

Harġa Nru 20 – Bidla tal-manifattur legali għal TCS Biosciences  
Ltd

## BD MICROTROL DISCS

BD Microtrol Discs huma mikroorganizmi mniexxa bil-friza tal-ewwel ġenerazzjoni mmanifatturati esklussivament minn kulturi<sup>NCTC®</sup> (Kollezżjoni Nazzjonali ta' Kulturi tat-Tip) u<sup>NCPP®</sup> (Kollezżjoni Nazzjonali ta' Fungi Patogeniċi). Huma ppreservati waqt hażna fit-tul bħala ċelloli mniexxa bil-friza sabieħ jimminimizzaw kwalunkwe alterazzjoni fil-fenotip ikkawżata minn mutazzjonijiet.

L-użu ta' BD Microtrol Discs huwa standardizzat, għalhekk ir-rażez kollha huma fornuti b'din l-Istruzzjonijiet ġenerali għall-Użu (IFU). Lista shiħa ta' razez, flimkien ma' deskrizzjoni, SKU u daqs tal-pakkett (forniti bħala kunjetti ta' 5, 10 jew 25 diska) jistgħu jinstabu online: [www.tcsbiosciences.co.uk/qcerts/index\\_bd.php](http://www.tcsbiosciences.co.uk/qcerts/index_bd.php)

### Użu intenzjonat

BD Microtrol Discs huma adattati għall-użu fl-laboratorji għall-kontroll tal-kwalità tal-midja tal-kultura, testijiet ta' identifikazzjoni bijokimika u ttestjar ta' suxxettibilità antimikrobika.

BD Microtrol Discs huma użati f'applikazzjonijiet mikrobijoloġiċi biex jikkontrollaw u jivvalidaw il-proċeduri ta' iżolament u ttestjar użati biex jiskopru u jidentifikaw mikroorganizmi patogeniċi. Jintużaw ukoll biex jikkontrollaw l-identifikazzjoni manwali jew awtomatizzata sussegwenti u l-ittestjar tas-suxxettibilità ta' izolati sinifikanti, li jinvolvu bijokimika jew b'determinazzjoni MIC, Maldi-Tof, diffużjoni tad-diska jew metodoloġija molekulari (ara Limitazzjonijiet).

Kull razza ta' BD Microtrol hija identifikata bl-isem tal-organizmu u n-numru tal-għbir tal-kultura u tipposjedi waħda jew aktar karatteristiċi speċifiċi għal skopijiet ta' kontroll tal-kwalità.

Proċeduri ta' ttestjar, midja rakkomandata, aġġornamenti u organizmi ta' kontroll xierqa huma deskritti f'dokumenti, bħal dawk disponibbli minn EUCAST, ISO, CLSI, il-Manwal tal-Mikrobijoloġija Klinika u UKHSA.

L-użu ta' BD Microtrol Discs huwa proċess manwali u jipprovdi riżultat kwalitattiv.

### Prekawzjonijiet u hażna

- Għal użu professjonali biss.
- BD Microtrol Discs fihom organizmi patogeniċi vijabbli tal-Kategorija 1 u tal-Kategorija 2 u għandhom jintużaw biss fl-laboratorji mghammra b' mod xieraq minn mikrobijoloġisti jew persuni taħt is-supervizjoni ta' mikrobijoloġisti kwalifikati b'taħriġ jew esperjenza biex jaħdmu ma' mikroorganizmi.
- Aħżen fit-temperatura indikata fuq it-tikketta. Jista' jsehh telf ta' vijabbiltà jekk id-diski jithallew 'il fuq minn din il-firxa tat-temperatura għal aktar milli mehtieg.
- Halli l-kunjett jilhaq it-temperatura tal-ambjent qabel jinfetaħ u poġġi l-għatu u s-soddieda fuq kull kunjett immedjatament wara li titneħħa diska. L-umdità fl-arja li tidhol fil-kunjett tikkawża tnaqqis fin-numru ta' organizmi vijabbli, li eventwalment iwassal għal telf shiħ tal-vijabbiltà.
- Tużax diski wara d-data ta' skadenza tagħhom. Dawn jistgħu juru telf ta' vijabbiltà.

### Rappurtar ta' incidenti serji

**UE biss:** L-utenti għandhom jirrapportaw kwalunkwe incident serju relatat mal-apparat lill-Manifattur u lill-Awtorità Nazzjonali Kompetenti.

**Barra mill-UE:** Ikkuntattja r-rappreżentant lokali tiegħek tal-BD għal kwalunkwe incident jew mistoqsija relatata ma' dan l-apparat.

## ISTRUZZJONIJIET GĦALL- UŻU

**Biex tneħħi d-diska mill-kunjett:** Diska titneħħa faċilment mill-kunjett bl-użu ta' forċipi sterili jew linja ta' inokulazzjoni sterili ta' 10µl.

**Għall-użu fuq midja solida:** Poġġi Diska fuq mezz solidu xieraq. Halli d-diska tirtab għal 10 –15-il minuta. Il-panċa tista' titqiegħed f'inkubatur biex thaffef il-proċess. Ifrex id-Diska imrattba madwar il-panċa u inkuba taħt l-aħjar kundizzjonijiet għar-razza.

**Għall-użu f'midja likwida:** Poġġi d-Diska f'l-10ml tal-likwidu (broth) xieraq. Evita l-produzzjoni ta' aerosols, hawwad il-likwidu bil-mod biex tholl id-Diska u inkuba taħt kundizzjonijiet ottimali.

INKELLA, għal użu rapidu, holl id-Diska, halli l-kultura tirkupra billi tinkuba f'35 – 37°C għal siegħa u mbagħad uża immedjatament. Permezz tal-esperimentazzjoni tkun tista' ssib l-aħjar dilwizzjoni għall-applikazzjoni tiegħek stess.

### Stabbiltà fl-użu

L-istabbiltà fl-użu hija speċifika għar-razza. Din l-informazzjoni tidher fuq ir-Rapport tat-Test tal-Kontroll tal-Kwalità għal Diski BD Microtrol bħala "Hażna" u "Nota Importanti: Uża fi żmien x xhur mill-ftuħ". Ir-Rapporti tat-Test tal-Kontroll tal-Kwalità għall-kodiċi tal-prodott / in-numri tal-lott kollha jistgħu jitnizzlu billi żżur: [tcsbiosciences.co.uk/qcerts/index\\_bd.php](http://tcsbiosciences.co.uk/qcerts/index_bd.php)

### Limitazzjonijiet

Sottokultura ripetuta tista' tikkawża li l-karatteristiċi ta' razza jinbidlu. BD Microtrol Discs hija subkultura tal-ewwel ġenerazzjoni minn kultura omm miġbura mill-Public Health England Culture Collections, u hija mfasla biex tintuża biex tikseb kulturi stokk tax-xogħol għall-użu fl-ittestjar. Huwa ġeneralment aċċettat li mhux aktar minn hames passaġġi (sottokulturi suċċessivi) għandhom isiru mill-kultura prinċipali, sabieħ jiġu evitati drift ġenetiku u għażla mutanti. Għalhekk, m'għandhomx isiru aktar minn erba' passaġġi mill-kultura tal-istokk tax-xogħol BD Microtrol Discs.

L-użu f'sistemi ta' kultura awtomatizzati għandu jiġi validat mill-utent aħhari.

### Ksur, tixrid u rimi

1. Id-Diski kollha esposti, l-imballaġġ ikkontaminat u l-oġġetti tal-ħġiegħ miksur għandhom jitqiegħdu f'kontenitur adattat u jew incinerati jew ittrattata f'awtoklavij f'121°C għal 30 minuta.
2. Kunjetti mhux imkissra jistgħu jitneħħew bil-forċipi, jinhaslu f'soluzzjoni batteriċida xierqa, jidhalhu, jitnixxfu u jinżammu għal aktar użu.

L-uċuħ kollha kkontaminati għandhom jiġu diżinfettati b'soluzzjoni batteriċida xierqa.

### Termini

EUCAST – Kumitat Ewropew dwar it-Testijiet tas-Suxxettibilità kontra l-Mikrobi  
CLSI – Istitut tal-Istandards Kliniċi u tal-Laboratorji  
UKHSA – UK Health Security Agency, li qabel kienet PHE Public Health England  
ISO – L-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni

### Referenzi

Manual of Clinical Microbiology: 12-il edizzjoni (ASM Books)

### Traduzzjonijiet tal-Istruzzjonijiet għall-użu



Ura s-sit web [tcsbiosciences.co.uk/qcerts/index\\_bd.php](http://tcsbiosciences.co.uk/qcerts/index_bd.php)